

NITRILE GENTLE TOUCH HQ VERT 6.0 GR



NITRILE	VERT	NON POUDRÉ	S-XL	AMBIDEXTRES	NON STÉRILES
---------	------	---------------	------	-------------	-----------------

Gants confortables en nitrile. Ils protègent contre les risques chimiques spécifiques et les solvants en contact sporadique. Une excellente préhension en milieu humide ou sec. Il offre une grande variété d'utilisations générales dans les secteurs de l'alimentation, de l'exploration et des examens médicaux, des laboratoires, de l'hygiène et du nettoyage, de la coiffure, du tatouage, du bricolage, etc.

Caractéristiques:

Ils ne contiennent pas de protéines de latex, conviennent aux personnes allergiques au latex.	Texturé sur toute la surface. Prise en main facile.
Vert, sans poussière, à usage unique, ambidextres.	Grande résistance et durabilité.
Manchette à rebord, protection contre les déversements.	Flexibilité et adaptabilité.

Présentation:

- Boîte distributrice de 100 pièces, avec ouverture découpée pour un accès hygiénique au gant.
- L'emballage contient: 10 boîtes de 100 pièces.
- Dimensions: 250 x 130 x 75 mm



Étiquetage: Date de fabrication, date d'expiration, numéro de lot, référence et code EAN. Désignation du produit en plusieurs langues: espagnol, anglais, français, allemand, portugais, italien.

Marquage CE, pictogrammes de protection, normes de sécurité et législation. Taille et unités, guide des tailles.

Dimensions du Gant	S	M	L	XL
LARGEUR DE LA PAUME	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
LONGUEUR	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 250 mm	Min 250 mm
Épaisseur de la paume mm (± 0.02)	0.12	0.12	0.12	0.12
Épaisseur des doigts mm (± 0.02)	0.17	0.17	0.17	0.17
Épaisseur du poignet mm (± 0.02)	0.09	0.09	0.09	0.09
Poids grammes (± 0.3)	5.8	6.0	6.3	6.5

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

✉ info@rubberex.es

www.rubberex.es

📍 Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

Règlementation:

- Catégorie III. Marquage CE conformément au Règlement (UE) 2016/425.
- Classe I. Selon le Règlement (UE) 2017/745 réglementant les dispositifs médicaux, qui transpose la directive 93/42 CEE relative aux dispositifs médicaux.
- Règlement alimentaire 10/2011 sur les matériaux plastiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- ASTM F1671 et ASTM F1670. Résistance à la pénétration du sang et des virus bactériophages.
- ISO 16604:2004. Bactériophage.
- ASTM D6978, résistance aux médicaments de chimiothérapie.
- EN ISO 374-1 :2016+A1:2018. Point 7 de la norme EN374-2. Point 5 de la norme EN374-4. Méthode UNE-EN 16523-1:2015.
- EN ISO 374-5 :2016. Exigences relatives aux risques liés aux micro-organismes. virus et bactéries).
- EN 420:2003+A1:2009. EN ISO 21420:2020.
- EN 455-1-2-3-4. Résistance à la rupture après vieillissement 12.76 N. Pendant la durée de vie de l'appareil. 6.24N.
- EN ISO 18889 :2019. Level G1. Gants de protection pour la manipulation de pesticides et pour les travailleurs des exploitations agricoles.

RÉSISTANCE CHIMIQUE:

PERMÉATION EN ISO 374-1:2016/A1.2018

Les gants sont classés en fonction du temps de pénétration, selon chaque produit chimique pour lequel le gant résiste à la perméation.

Les gants sont testés contre les produits chimiques suivants:

PRODUITS CHIMIQUES	NIVEAU	LETTRE
N-HEPTANE	6	J
40% HYDROXYDE DE SODIUM	6	K
30% PEROXYDE D'HYDROGÈNE	4	p
37% FORMALDÉHYDE	6	T

Niveaux de prestation :

Durée de passage (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

DÉGRADATION

Le % de dégradation (DR) est déterminé pour chaque produit chimique utilisé dans la perméation.

(DR) J: n-Heptane = 34.4%

(DR) K: Hydroxyde de sodium 40% = -5.0%

(DR) P: Peroxyde d'hydrogène 30% = 13.2%

(DR) T: Formaldéhyde 37% = 2.05%

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

NITRILE GENTLE TOUCH HQ VERT 6.0 GR



Le GANT NITRILE type EPI « GENTLE TOUCH HQ VERT » doit être utilisé pour protéger la main de l'utilisateur contre les risques chimiques (produits et niveaux mentionnés ci-dessus) et contre les risques microbiologiques (bactéries, champignons et virus).

Cet EPI ne doit jamais être utilisé contre des risques autres que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de cet EPI doit être évaluée correctement en fonction du lieu de travail.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Type B EN ISO 374-5:2016



J K P T



VIRUS



0161



CAT III

REF	Couleur	Taille	T. numérique	EAN
0404	Vert	S	7	8435234504048
0405	Vert	M	8	8435234504055
0406	Vert	L	9	8435234504062
0407	Vert	XL	10	8435234504079

Distributeur:

250x75x130mm



Logistique:

10 boîtes de 100 unités par caisse

1000 gants par caisse

56 caisses par palette

RUBBEREX SPAIN S.L

Rev.13 APR25

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España